

Ako vykonať meranie pomocou aplikácie Charder ProScan

Pôvodný zdroj: <https://www.chardermedical.com/news/blog/How-to-measure-using-Charder-ProScan-App.htm>

Kompatibilné zariadenie podľa článku: analyzátor telesného zloženia U310

1. Stiahnite aplikáciu

Aplikáciu Charder ProScan stiahnite z Google Play pre Android alebo z App Store pre iOS.



Charder ProScan v Google Play.




Charder ProScan v App Store.

2. Vytvorte hlavný účet


Aplikácia používa administrátorské a používateľské účty. Merania sa ukladajú k používateľským účtom, ktoré vytvoríte po prihlásení správcu.

Zadajte názov účtu a heslo a stlačte "**Register new account**". Týmto účtom sa budete prihlasovať aj neskôr.

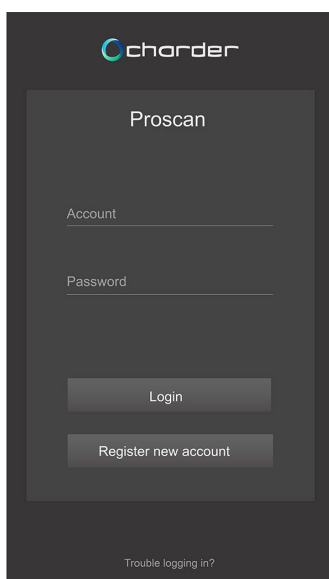


Vytvorenie administrátorského účtu.

Dôležité: Aplikácia pracuje offline. Ak heslo zabudnete, nie je možné ho obnoviť. Ako prevenciu možno v Settings > App Settings zapnúť funkciu Auto Login.

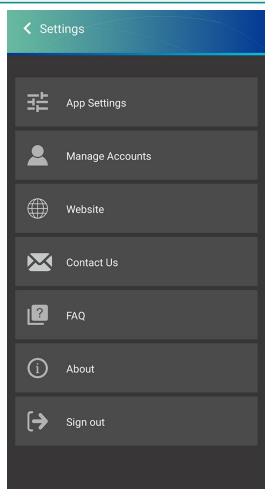


Otvorenie nastavení aplikácie.

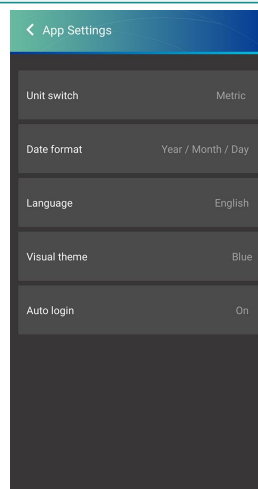

Zapnutie voľby "Auto Login".

3. Vytvorte používateľský účet

Stlačte "+ Add new user" a vytvorte potrebný počet používateľov. Výpočet telesného zloženia používa vek, výšku a pohlavie, preto údaje zadajte správne.

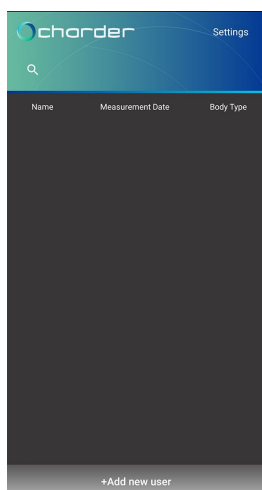


Voľba "+ Add new user".


Zadanie údajov používateľa.

4. Spárujte aplikáciu so zariadením

- 1 Vyberte používateľský účet určený na meranie.
- 2 Stlačte prostrednú ikonu v tvare postavy.
- 3 Keď je aplikácia pripravená, krátko vstúpte na zariadenie a zostúpte z neho, aby sa zaplo.
- 4 Počkajte na automatické spárovanie zariadenia s aplikáciou.

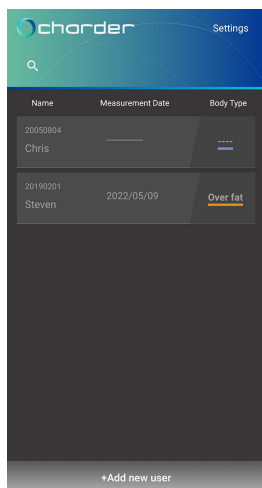


Výber používateľa.

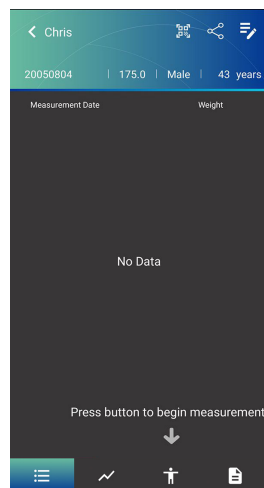

Spustenie párovania ikonou postavy.



Aplikácia čaká na pripojenie zariadenia.

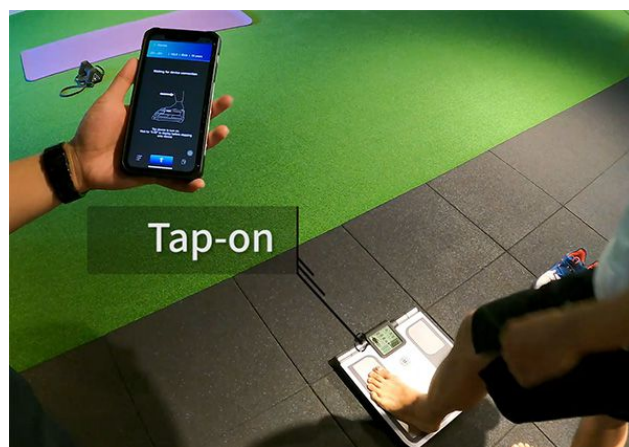

Krátkym vstúpením sa U310 zapne.




Úspešné pripojenie U310 k aplikácii.


Pred párovaním: zapnite Bluetooth v smartfóne. Používatelia Androidu musia podľa pôvodného článku zapnúť aj služby určovania polohy.

5. Vykonajte analýzu tela


- 1 Vstúpte na platformu a uchopte rukoväti.
- 2 Počkajte, kým zariadenie overí správny kontakt elektród.
- 3 Zdvihnite rukoväť približne do úrovne očí a sledujte displej LCD.
- 4 Po skončení merania stlačte v aplikácii **"View Results"**.

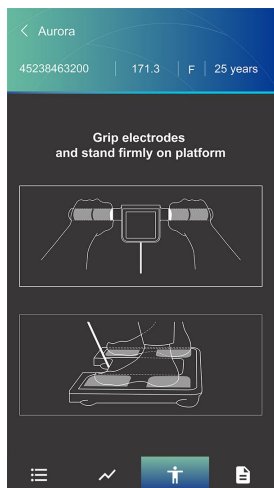


Kontrola kontaktu elektród.

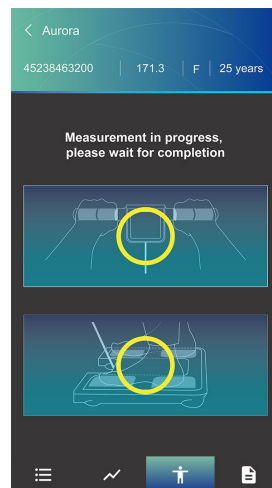


Správny kontakt elektród.

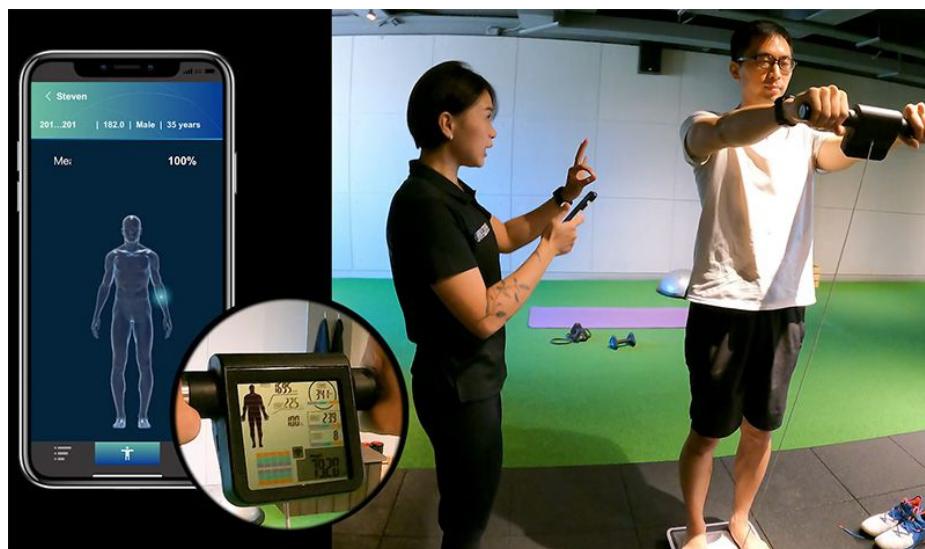

Rukoväť zdvihnite tak, aby bol displej dobre viditeľný.

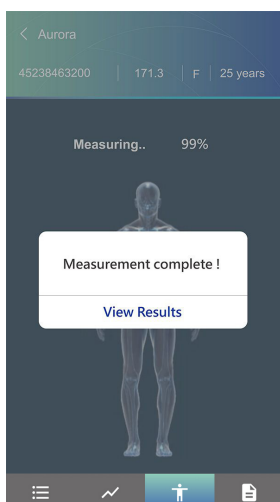

Dokončené meranie.

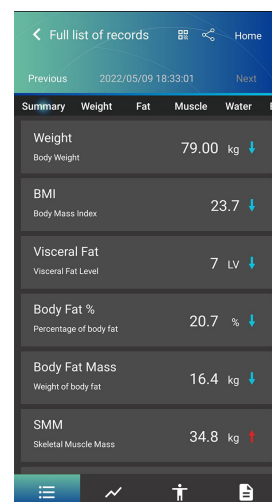

Zobrazenie výsledkov v aplikácii.